


Het gebruik van somnipax guard bij overbeet (mandibulaire retrognathia)

Voor degenen met een sterke overbeet, kunnen de standaard bandjes van een snurkbeugel in individuele gevallen te kort zijn. Als de onderkaak van nature erg ver naar achteren ligt, zou zelfs de langste band-lengte de onderkaak zo ver naar voren trekken dat hij oncomfortabel zou zijn om te dragen.

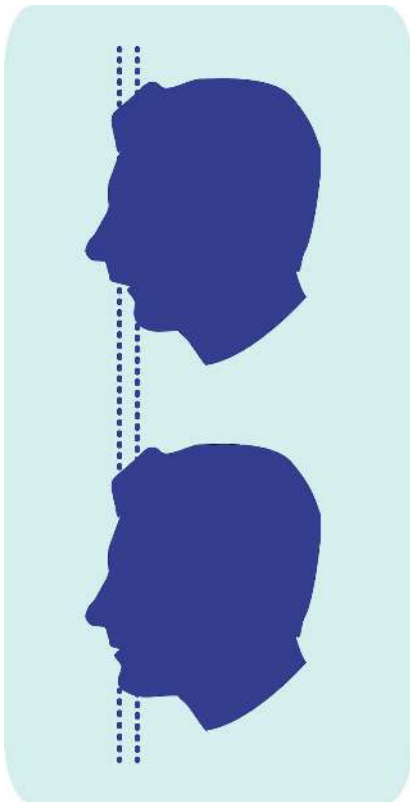

Met de somnipax guard is dit probleem elegant op te lossen. Neem bandje nr. 6 (= de langste band) en snijd deze in tweeën zoals aangegeven in [figuur 2](#). Dit resulteert in twee afzonderlijke bandjes, die vervolgens zoals normaal aan de snurkbeugel worden bevestigd ([figuur 3](#)). Deze bandjes zijn extra lang en zorgen ervoor dat de onderkaak zeer gematigd naar voor wordt getrokken. Een ideale oplossing voor mensen met een sterke overbeet.

